

CHECKLIST

voor aanschaf en voorbereiding op gebruik van een autoclaaf

APPARATUUR

- Autoclaaf + toebehoren. Autoclaaf voldoet aan de norm NEN-EN 13060. Zie verder het kader 'Soorten autoclaven'.

INSTRUMENTARIUM

- Voldoende aantallen sets?
- Opslag gesteriliseerd instrumentarium.

RUIMTE WAAR AUTOCLAAF OPGESTELD WORDT

- Aan- en afvoer van water geregeld.
- Werkblad met spoelbak aanwezig.
- Extra elektriciteitsgroep aanwezig.
- Mogelijkheid om schone en vuile processen te scheiden. (Bij voorkeur verschillende werkbladen).

MATERIALEN

- Bewaarmiddel (eiwitoplossend).
- Alcohol 70%.
- Eventueel gedemineraliseerd water.
- Laminaatzakjes.
- Sterilisatietape.

WERKZAAMHEDEN

Beschrijf in een protocol (zie ook voorbeelden):

- Wie verantwoordelijk is voor het reinigen en hoe dat gebeurt.
- Wie verantwoordelijk is voor steriliseren/desinfecteren* en hoe dat gebeurt.
- Wie verantwoordelijk is voor de inkoop en het aanvullen van materialen*.
- Wie geïnstrueerd is over de te volgen sterilisatieprocedure*.
- De frequentie van het steriliseren.
- De geldigheidsduur van de zo bereikte steriliteit.

*Denk ook aan eventuele vervanging.

DOCUMENTATIE

- Onderhoudscontracten met fabrikant.
- Duidelijke en eenvoudige instructies voor autoclaven op (gelamineerde) kaart.
- Certificaten van validatie en onderhoud (archiveren).

Soorten autoclaven

De NEN-norm 13060 voor kleine stoomsterilisatoren onderscheidt verschillende klassen autoclaven, afhankelijk van het proces dat het apparaat kan uitvoeren. In volgorde van eenvoudig naar uitgebreid:

- N-klasse: alleen geschikt voor 'naked', dat wil zeggen onverpakte massieve instrumenten. Ongeschikt voor gebruik in de huisartsenpraktijk.
- S-klasse: S staat voor 'special', dat wil zeggen de fabrikant geeft aan voor welk instrumentarium de autoclaaf geschikt is. Geschikt voor verpakte massieve instrumenten.
- VS-klasse: VS staat voor 'vacuüm special'. Kan ook eenvoudige holle instrumenten zoals verpakte specula en oortips steriliseren.
- B-klasse: B staat voor 'Big range', dat wil zeggen het apparaat is in staat om een grote range aan verschillende instrumenten te steriliseren, ook moeilijk te steriliseren holle instrumenten.

In de huisartsenpraktijk zal over het algemeen een S- of VS-klasse autoclaaf volstaan. Kies aan de hand van het soort instrumentarium dat u wilt steriliseren in overleg met uw leverancier een geschikte autoclaaf.